


Фітопрост® , супозиторії ректальні
ГРАФІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ УПАКОВКИ *
Інструкція із застосування медичного виробу
(сторона 1)

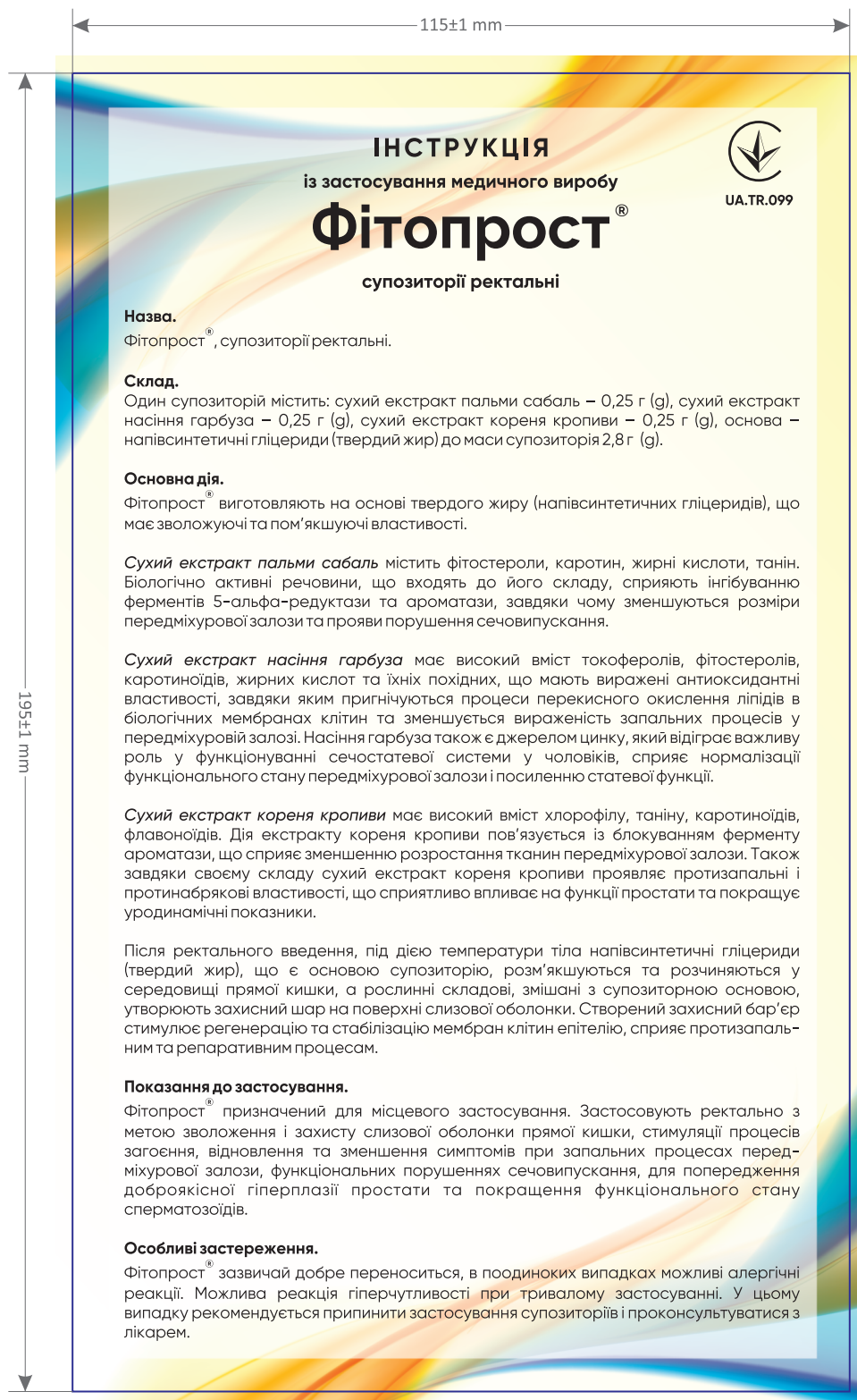

Фітопрост[®], супозиторії ректальні
ГРАФІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ УПАКОВКИ *
Інструкція із застосування медичного виробу
(сторона 2)

195±1 mm

115±1 mm

Не перевищувати рекомендовану дозу.
Застосовувати ректально.
Не застосовувати медичний виріб після завершення терміну придатності.
Не використовувати, якщо пошкоджено внутрішню упаковку.
Медичний виріб не має загальної системної дії, чинить місцеву зволожуючу, заспокійливу, регенеруючу дії. Не здійснює фармакологічної, імунологічної або метаболічної дії на організм людини.

Протипоказання.
Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату. Вагітність та лактація.
Дитячий вік.

Спосіб застосування та дози.
Супозиторії застосовують ректально по 1 супозиторію 1-2 рази на добу протягом до 20 діб. Виріб для одноразового використання.
• Перед застосуванням супозиторіїв вимити руки з милом і теплою водою.
• Якщо супозиторій занадто м'який, покладіть його на декілька хвилин у холодильник або потримайте під струменем холодної води перед тим, як виймати з блістера.
• Супозиторій звільнити від блістера і ввести якомога глибше.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці за температури від 2 °C до 25 °C.

Термін придатності. 2 роки від дати виготовлення.

Упаковка. По 5 супозиторіїв ректальних у блістері, по 1 або 2 блістери у пачці.

Виробник. Приватне акціонерне товариство «Лекхім-Харків».

Адреса. Україна, 61115, Харківська область, місто Харків, вулиця Северина Потоцького, будинок 36, тел.: +38 (057) 293-70-44, e-mail: lekhim@lekhim.net.ua, lekhim.ua

Ексклюзивний дистриб'ютор. ТОВ «Мобіль Медікал», Україна, 07354, Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, пров. 1-го Травня, 6. 17 А, тел.: +38 (044) 353-80-02, e-mail: info@mobil-medical.com, mobil-medical.com

Тлумачення символів, наведених в маркуванні	
Символ	Назва символу
	Виробник
	Код партії
	Дата виготовлення
	Використати до
	Обмеження температури від 2 °C до 25 °C
	Користуйтеся інструкцією із застосування
	Ознайомитися з попередженнями та запобіжними заходами
	Не використовувати в разі пошкодження пакування
	Повторно не використовувати
	Знак відповідності технічним регламентам
UA.TR.099	Ідентифікаційний номер ООВ ТОВ «УКРМЕДСЕРТ»

Дата останнього перегляду: 2025-12-22






UA.TR.099