



# ДОМЕНОРМ® (DOMENORM®)

## Вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами, 30 г (g)

### Інструкція для застосування медичного виробу

**Склад:** гіалуронат натрію – 1,00%, водний екстракт ромашки, календули і конюшини – 5,00%, пропіленгліколь – 5,00%, лецитин – 1,00%, карбомер – 0,70%, вітамін Е – 0,50%, дітиламін – 0,40%, ніпагін – 0,12%, ЕДТА – 0,05%, рослинні фосфоліпіди сої – 0,02%, ніпазол – 0,03%, вода очищена – 86,18%.

**Форма випуску:** гель в тубі по 30 г (g), з вагінальним аплікатором у картонній упаковці.

#### ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

**ДОМЕНОРМ®** - негормональний зволожуючий гель з ліпосомами, який містить унікальну комбінацію гіалуронової кислоти та рослинних екстрактів, що чинять гормоноподібну, протизапальну, антисептичну, ранозагоювальну, пом'якшувальну та зволожуючу дію.

#### ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТІВ

**Гіалуронат натрію (гіалуронова кислота)** – природний молекулярний біополімер, який володіє унікальною здатністю посилювати зв'язування і утримання молекул води, що супроводжується активним зволоженням шкіри та слизових оболонок статевих органів, усуває почервоніння та подразнення.

Сприяє загоєнню ран і зняттю запальних реакцій за рахунок підвищення активності гранулоцитів та посилення проліферації фібробластів.

З молекулами води гіалуронова кислота утворює дисперсійний матрикс, який заміщає дефект тканини, утворює натуральну опору для клітин та створює бар'єр. Це все виступає в якості структурної підтримки та сприяє відновленню еластичності, підвищенню тонуусу, живленню тканин, загоєнню ран без утворення грубих келоїдних рубців та зняттю запальних реакцій.

**Екстракт ромашки** – має антисептичну та місцеву знеболюючу дію, допомагає прискорити регенерацію епітелію, та зменшує запальний процес. Завдяки вмісту хамазулена виявляє також місцеву антиалергічну дію.

**Екстракт календули (нагідок)** – забезпечує протизапальний ефект, прискорює загоєння саден і тріщин, має протигрибковий, антибактеріальний ефект. Компонент інулін слугує живильним середовищем для лактобактерій.

Екстракт календули прискорює процеси регенерації тканин і слизових оболонок, спонукає до загоєння виразок і ерозій. Використання екстракту календули перешкоджає появі грубого келоїдного рубця на місці загоєння.

**Екстракт конюшини** – джерело ізофлавоноїдів (фітоестрогенів). Низькомолекулярні поліфеноли у складі мають слабокислу реакцію та володіють в'язкістю, але не виявляють дубильних властивостей. При взаємодії з білками утворюють захисну плівку на слизових оболонках і ранових поверхнях. Мають бактерицидні та фунгіцидні властивості.

**Рослинні фосфоліпіди сої** – багаті токоферолами, що характеризуються Е-вітамінною активністю. Мають антиоксидантну дію, сприяють регенерації мембран клітин. Рослинні фосфоліпіди сої виявляють стимулюючі естрогеноподібні властивості. Розщеплюються з утворенням цукристої частини, яка слугує живильним середовищем для лактобактерій.

**Альфа токоферолу ацетат (вітамін Е)** – жиророзчинний вітамін, який чинить значну антиоксидантну дію. При зовнішньому застосуванні сприяє збереженню води в тканинах і слизових оболонках та підтримує пружність і еластичність тканин. Допомагає істотно зменшити симптоми вагінальної сухості, стимулюючи вироблення вагінального секрету.

#### РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ

**ДОМЕНОРМ®, вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами**, призначений для використання в медицині. Гель рекомендується застосовувати з лікувально-профілактичною метою:

- При вульвовагінітах внаслідок надмірного використання засобів інтимної гігієни;
- При сухості та атрофічних процесах піхви, внаслідок зниження рівня естрогену;
- Для змащення частин тіла з метою покращення регенерації, зменшення проникності бар'єрних тканин, запобігання утворення грануляційної тканини та рубців після хірургічних операцій в дерматології та дерматокосметології;
- Як допоміжний засіб для змащення при тріщинах промежини та при анальних тріщинах;
- Для відновлення слизової оболонки при запальних станах піхви, що супроводжуються сверблячкою, печінням, роздратуванням або сухістю слизової оболонки;
- Для запобігання проявів симптомів сухості піхви та вульви, пов'язаних з використанням місцевих антисептиків, гормональних чи комбінованих препаратів;
- Для відновлення слизової оболонки при запальних станах піхви, пов'язаних з тривалим застосуванням глюкокортикостероїдів, антибактеріальних засобів, оральних контрацептивів та барбітуратів;
- Для відновлення цілісності шкіри та слизових оболонок після статевих контактів або в післяпологовий період;
- В якості допоміжного засобу для змащення між тілом і медичними інструментами з метою профілактики ушкоджень слизової оболонки піхви та при необхідності прискорення загоєння після гінекологічних та хірургічних втручань;
- Як допоміжний засіб для змащення частин тіла в процесі фізичних обстежень;
- Для попередження та усунення симптомів атрофії слизової оболонки піхви та зовнішніх статевих органів в результаті хіміотерапії, променевої або радіотерапії;
- Як гігієнічно-профілактичний засіб після відвідування місць громадського користування (сауна, баня, басейн, водойми) для запобігання інфікування.

Перед застосуванням бажана консультація з лікарем.

Застосовувати вагінально або зовнішньо 1–3 рази на добу протягом 7–10 днів курсами або по необхідності. Перед застосуванням ретельно вимити руки.

#### Спосіб застосування:

**У разі хірургічних втручань на шкірі і слизових оболонках - застосовувати зовнішньо.**

Уражені ділянки шкіри та слизових оболонок обробляти гелем легкими масажними рухами. Застосовувати 2–3 рази на день або за необхідністю.

#### При атрофічних змінах.

Слизові оболонки та шкіру зовнішніх статевих органів змащувати гелем легкими рухами. Застосовувати 2–3 рази на день або за необхідністю.

Тривалість лікування залежить від розвитку симптомів; при необхідності **ДОМЕНОРМ®, вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами** можна використовувати протягом тривалого періоду.

**ДОМЕНОРМ®, вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами** можна використовувати в якості лубриканта.





При вагінальному застосуванні використовуйте аплікатор.

**ДОМЕНОРМ®, вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами** у піхву вводити інтравагінально за допомогою аплікатора.

Рекомендована разова доза становить 3–4 мл гелю (що відповідає 5–6 см гелю у аплікаторі), один раз на день переважно перед сном протягом 7–10 днів або за потребою. Для зручності на тубу та коробку нанесена шкала у сантиметрах.

#### Інструкція з використання аплікатора:

Аплікатор призначений для багаторазового індивідуального використання. Аплікатор і лінійна шкала на упаковці та тубі призначені для точного дозування і комфортного введення гелю **ДОМЕНОРМ®** у піхву.

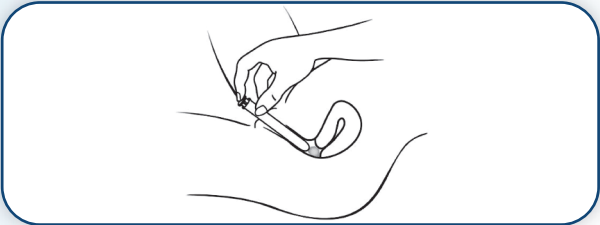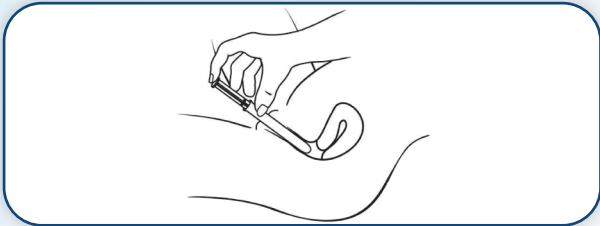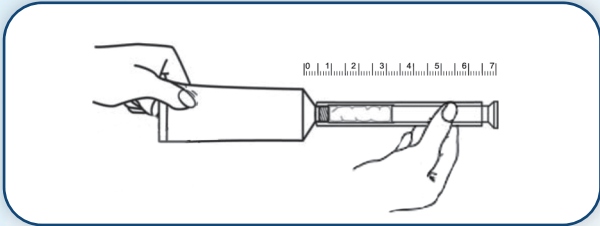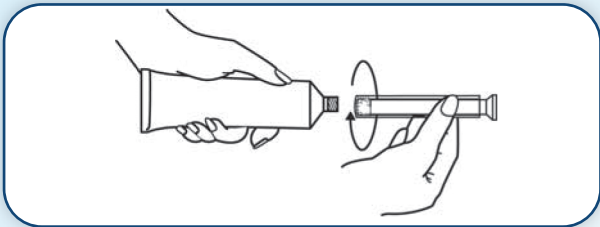

НЕ КЛАСТИ АПЛІКАТОР У ГАРЯЧУ АБО КИПЛЯЧУ ВОДУ. Аплікатор слід зібрати, повністю вставивши поршень у циліндр, долаючи опір, де він відчувається. При спорожненні туби аплікатор слід утилізувати.

1. Зняти ковпачок з туби, перевернути ковпачок і за допомогою гострого виступу на ньому відкрити тубу.
2. Прикрутити кінець аплікатора до туби. Слід переконатися, що поршень повністю увійшов у циліндр.
3. Повільно натягуючи поршень аплікатора на себе та одночасно м'яко натискаючи на тубу з протилежного кінця, обережно видавлюйте гель в аплікатор до заповнення необхідного обсягу.
4. Відкрутіть аплікатор і закрийте тубу ковпачком.
5. У положенні лежачи на спині підтягніть коліна до грудей. Тримуючи аплікатор горизонтально, обережно введіть його в піхву якомога глибше, намагаючись не викликати неприємних відчуттів.
6. Повільно натискаючи на поршень до упору, введіть вміст аплікатора в піхву.
7. Обережно витягніть аплікатор з піхви.
8. Вимийте аплікатор (циліндр і поршень) у теплій мильній воді, не використовуйте мийні засоби. Після миття ретельно ополоснути, висушити та покласти в упаковку.

**Попередження щодо застосування.** Можлива індивідуальна чутливість до окремих компонентів гелю. У таких випадках використання гелю слід припинити.

Не використовувати аплікатор у разі пошкодження.

Не використовувати виріб у разі пошкодження первинного пакування (туби).

Досліджень щодо впливу на місцеві контрацептиви не проведено.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці виробника в сухому, недоступному для дітей місці, за температури 5 °С - 25 °С.

**Термін придатності:** 24 місяці.

**Тлумачення символів, які наведені на маркуванні.**

Познака	Назва позначки
	Виробник
	Дата виготовлення
	Термін використання, використати до
	Код партії, номер лоту
	Користуйтеся інструкцією щодо використання
	Ознайомитися з попередженнями та запобіжними заходами
	Обмеження температури від 5 °С до 25 °С
	Знак відповідності технічним регламентам

**Виробник:** ТОВ «Легер Фарма», Україна, 02081, м. Київ, вул. Урлівська, 23-Б, оф.241, тел.: +380 44 239-26-41.

**Виробнича дільниця:** ПРАТ «ХІМФАРМЗАВОД «ЧЕРВОНА ЗІРКА», 61010, Україна, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.

**Дата останнього перегляду інструкції:** 13.09.2024 року.

**Ексклюзивний дистриб'ютор:** ТОВ «Мобіль Медікал», Україна, 07354, Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, пров. 1-го Травня, буд. 17-А, тел.: +380 44 353-80-02, www.mobil-medical.com, e-mail: info@mobil-medical.com